

## HOE ZET U EEN MASKER OP?

Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht. Als het masker niet goed aansluit kunt u ongefilterde vervuilde lucht via de randen inademen. Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht. Goed scheren is daarom belangrijk. Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is.

- Zorg dat de handen schoon zijn.
- Trek het masker open en buig daarbij de neusbeugel licht.
- Houdt het masker in één hand en de elastieken in de andere hand.
- Houdt het masker onder de kin en plaats de elastieken op de kruin van het hoofd.
- Controleer of de flap onder de kin goed naar achteren zit.
- Plaats het onderste elastiek onder de oren. De banden kruisen niet.
- Plaats de bovenkant van het masker net onder de neusbrug. Dat is het zachte deel van de neus. Druk het masker met twee handen aan beide zijden tegelijkertijd aan. Beweeg daarbij van boven naar beneden. Als u deze handeling niet goed doet, ontstaat er snel een kier.
- Voel of het masker goed aansluit.
- Het masker is voor éénmalig gebruik, deponeer het na gebruik in de afvalbak. Laat het masker dus niet onder de kin bungelen, en stop het ook niet in uw zak.

## HOE ZET U EEN MASKER AF?

- Kin naar voren.
- Naar voren buigen met het gezicht naar voren.
- Pak beide elastieken met twee handen vast en trek het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het masker niet aan.

MASKER hebben geen "CE" certificatie.

**Ongeschikt als FFP2/FFP3 masker, enkel te gebruiken als comfortmaskers en niet als PBM !**



**Ne convient pas comme masque FFP2/FFP3, peut uniquement être utilisé comme masque de confort et pas comme EPI !**